

OTG/USB - 200 萬畫素頭皮檢測儀 使用說明書

一、USB-接電腦或 NB 使用

需先行下載「簡易版頭皮檢測軟體」，再將儀器透過 USB 接上桌上型電腦或 NB 進行檢測。
(此軟體僅限 windows 作業系統之電腦或筆電使用)

操作步驟如下：


STEP1：請先至下面連結網頁中，下載「簡易版頭皮檢測軟體」。

下載網址 --- > www.scalpx.com.tw/download/snapshotmaker


STEP2：下載完成，將檔案解壓縮後(請將檔案路徑放在自己常用的地方)，即可使用。

STEP3：使用前先將檢測儀器利用 USB 接上電腦(首次使用，電腦 USB 會自動設定。)

STEP4：打開已下載解壓縮後的資料夾，點選「Snapshot Maker」，畫面如下所示：

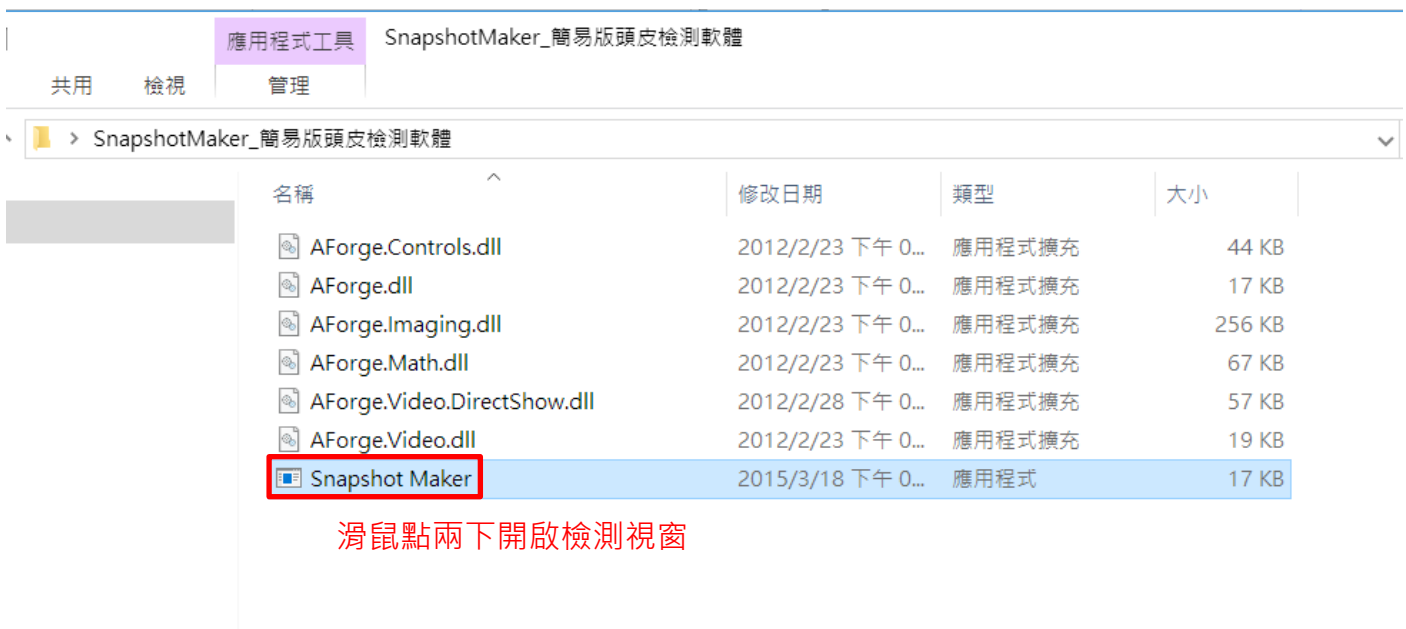


STEP5：檢測視窗開啟後，先選取連接的儀器設備 - **USB Camera**，再點選右方 **Connect**，確認畫面顯示，即可開始使用。

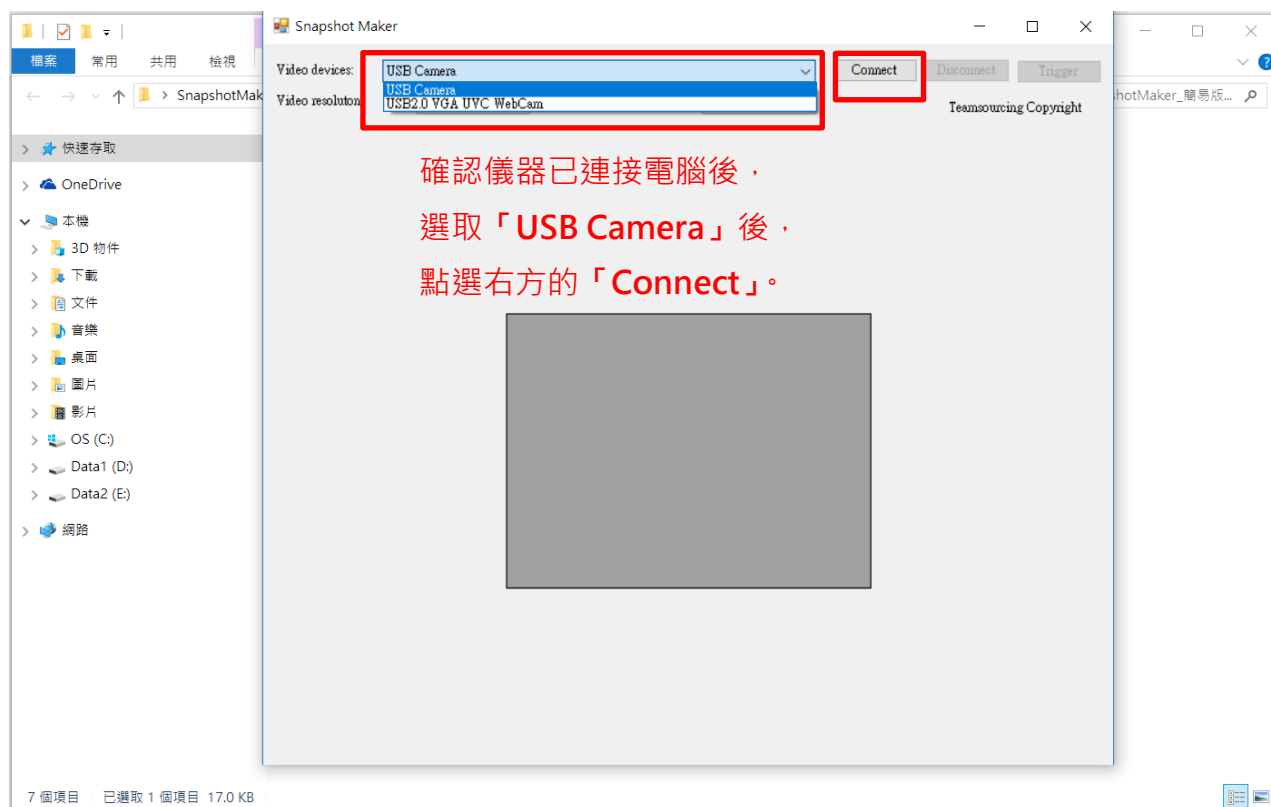


拍照時，先利用儀器上的旋轉鈕調整焦距，對焦完成，按下儀器機身上的拍照鈕即可。



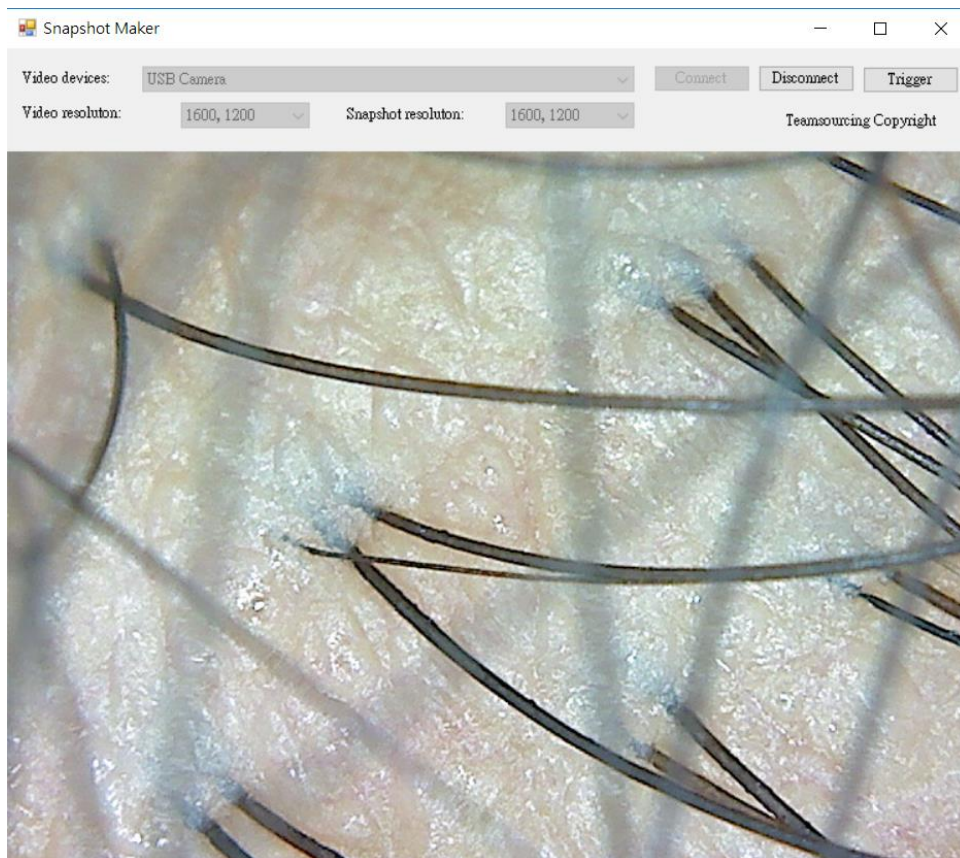

STEP6 : 拍下後的照片，點選「Save」，可以自由選擇儲存圖片到任何資料夾位置。

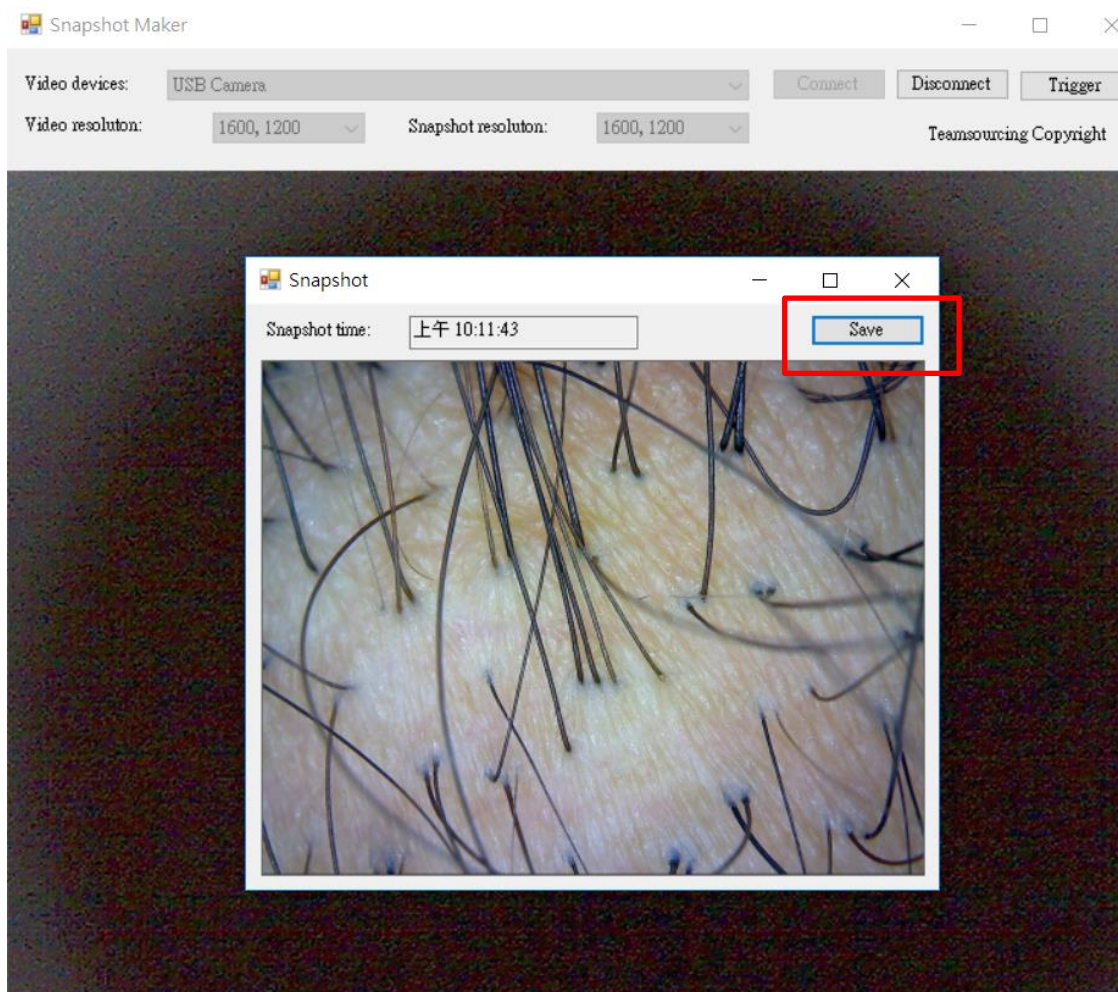

二、OTG-接手機使用

1 請先至 Google Play 下載「CameraFi」App 程式。(直接掃描下方 QR CODE)



2.利用附贈的轉接頭，先接上手機，再打開 CameraFi，即可立即使用。



※OTG 適用手機/平板型號

品牌	適用型號	品牌	適用型號
SAMSUNG 三星	S3、S4、S5、S6、S6 Edge、S6 Edge plus、Note2、Note3、Note4、Note5、J7、A7 N5100、P600、Tab S2、Tab A (A5--不支援)	OPPO	A31C、R3、A53、Find7、3007、R2017 (R7A5-不支援)
Meizu 魅族	X2	HTC	E8、M7、M8、M9、desire EYE
小米	小米 3、小米 4、小米 NOTE (小米 4C-不支援)	紅米	紅米 2、紅米 Note3 (紅米 2A、Note2--不支援)
Nubia	Z5S、Z7、Z7min、Z9min、Z9max	Motorola	Xpro
ZTE(中興)	U9180、N9180、Z5MAX	VIVO	X3s、X3l、X5v、X510t
SONY	Z1 及以上機款、SGP32(平板)	LG	GPR02、Nexus5
ASUS(華碩)	Zenpone2、Zenpone5 (Zenpad-不支援)	INFOCUS	M812